

Technologie d'auto-insémination 'tout en un'



Respect de l'animal



Gain de temps réel



Confort de l'utilisateur







Système cire NeoQuick

- Fonte ultra rapide
- Vidange rapide après l'introduction
- Insémination pendant l'immobilité de la truie

Collerettes Soft Technologie

- · Utilisation sans gel
- Excellente tenue
- Passage facile sur cochette
- Effet 'ventouse' pour une meilleure tenue au col

Design intro facile

- Tube à diamètre faible
- · Positionnement plus facile
- · Meilleur maintien dans la truie
- · Pas de rejet de la sonde

Enveloppe sanitaire easy: clean

- Absence de nettoyage des vulves
- Fort gain de temps
- · Confort de travail

Réducteur de débit

- Effet 'jet' pour que la semence passe le col
- · Vidange au rythme de la truie
- · Meilleure prise de la semence

Membrane profec

- Pression faible (1/3 de moins qu'un autre conditionnement)
- Matière haute étanchéité : lutte contre l'oxydation des spermatozoïdes
- Meilleure conservation

Emballage

- · Hermétique +++
- Ouverture facile
- · Réduction des déchets
- Protection sanitaire


NE.

Agiter le contenant le avant IA


Réserve externe

- Non traumatisant pour les truies et les cochettes
- Utilisation sans gel
- · Contrôle visuel de la vidange


Instructions d'utilisation du NEOSEM XTRA

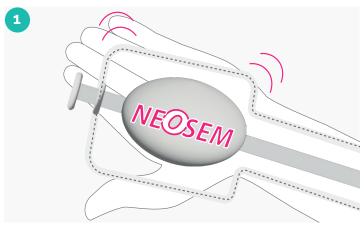


Tapoter la réserve pour homogénéiser la semence.

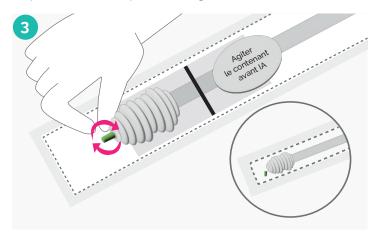

Casser le bouchon sécable vert au travers de l'emballage par un 'aller et retour'.

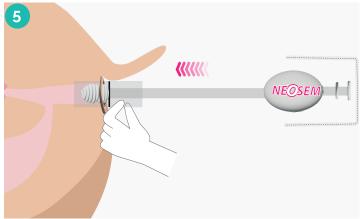


Introduire la sonde, sans gel, jusqu'au trait noir de easy clean. Maintenir l'enveloppe easy clean et pousser la sonde pour l'introduire.

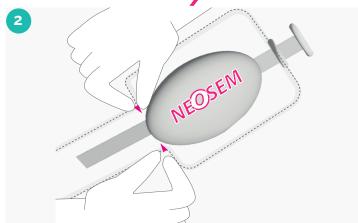

Ouvrir totalement la base de l'emballage avec les prédécoupages.



Maintenir le bouchon sécable (vert). Tirer l'emballage pour dégager la sonde intégralement.

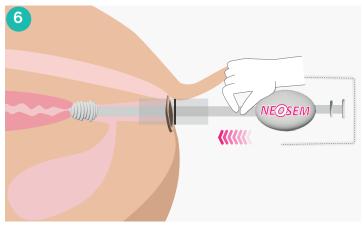

Ajuster l'introduction en appuyant sur la base du tube de sonde pour l'introduire au maximum et bloquer la tête de la sonde au col de la truie.







www.yxia.fr

Votre interlocuteur Yxia

